

GUÍA RÁPIDA SENTIERO HANDHELD DIAGNÓSTICO AVANZADO (ETIQUETA AZUL)

ENCENDIDO, APAGADO, CARGA DEL EQUIPO



Botón de encendido/apagado al lado derecho



Conector para el cargador

MENÚ DE INICIO

Hora actual

09:33

Estado de la batería

Personalizar ajustes

Audiometría

DPOEA Rápido

DPOEA Diag

DPOEA Umbral

Seleccionar paciente

Apagar el equipo



Información adicional sobre opciones para la pantalla actual

PRUEBAS

AUDIOMETRÍA


Conecte los auriculares al conector azul y seleccione el botón de **Audiometría: Umbrales** en el menú de inicio.




GUÍA RÁPIDA SENTIERO HANDHELD DIAGNÓSTICO AVANZADO (ETIQUETA AZUL)

Seleccione el oído en el que desea comenzar la prueba. Aparecerá la pantalla de prueba.

PANTALLA DE PRUEBA

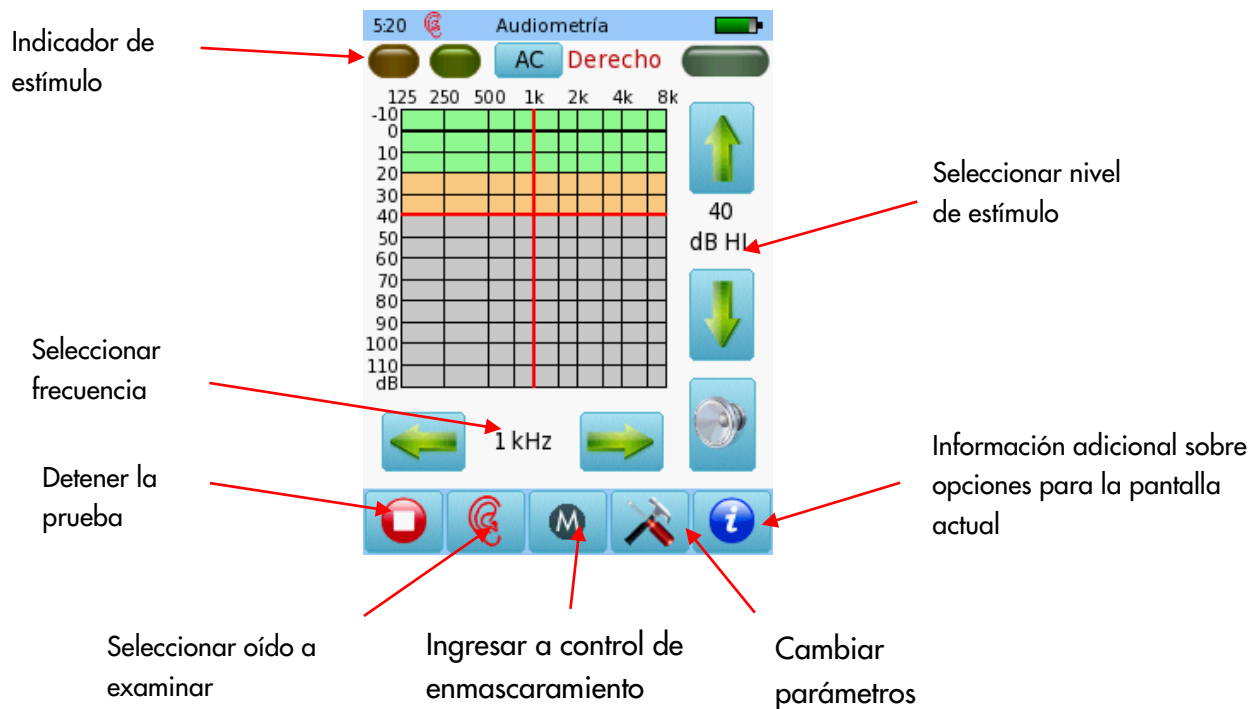

RESULTADOS DE PRUEBA DE AUDIOMETRÍA

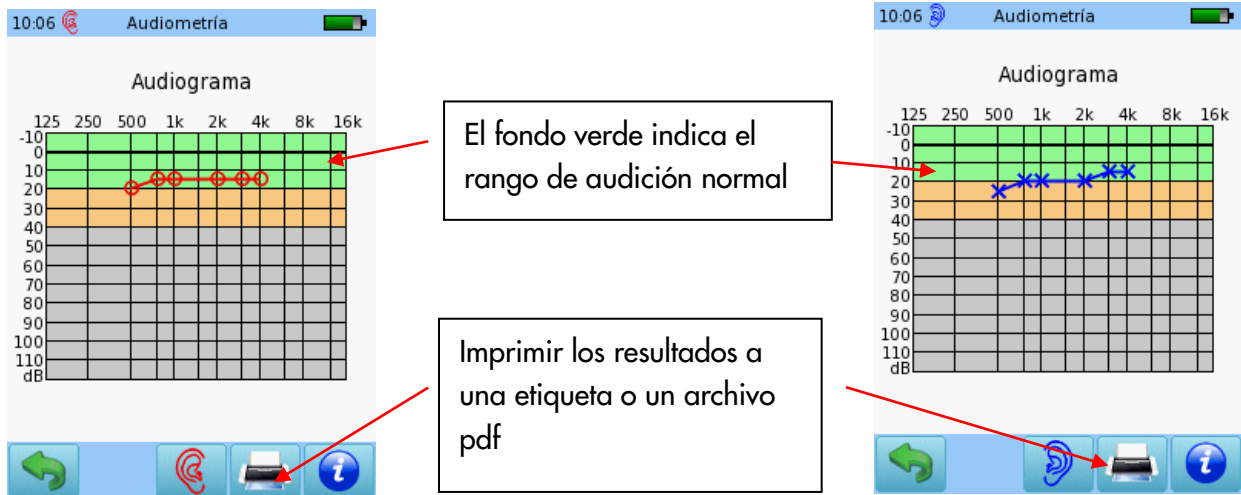

GUÍA RÁPIDA SENTIERO HANDHELD DIAGNÓSTICO AVANZADO (ETIQUETA AZUL)


AUDIOMETRÍA SCREENING

Conecte los auriculares al conector azul y seleccione el botón de Audiometría: Screening en el menú de inicio.



Seleccione el oído en el que desea comenzar la prueba. Aparecerá la pantalla de prueba.

PANTALLA DE PRUEBA DE AUDIOMETRÍA SCREENING

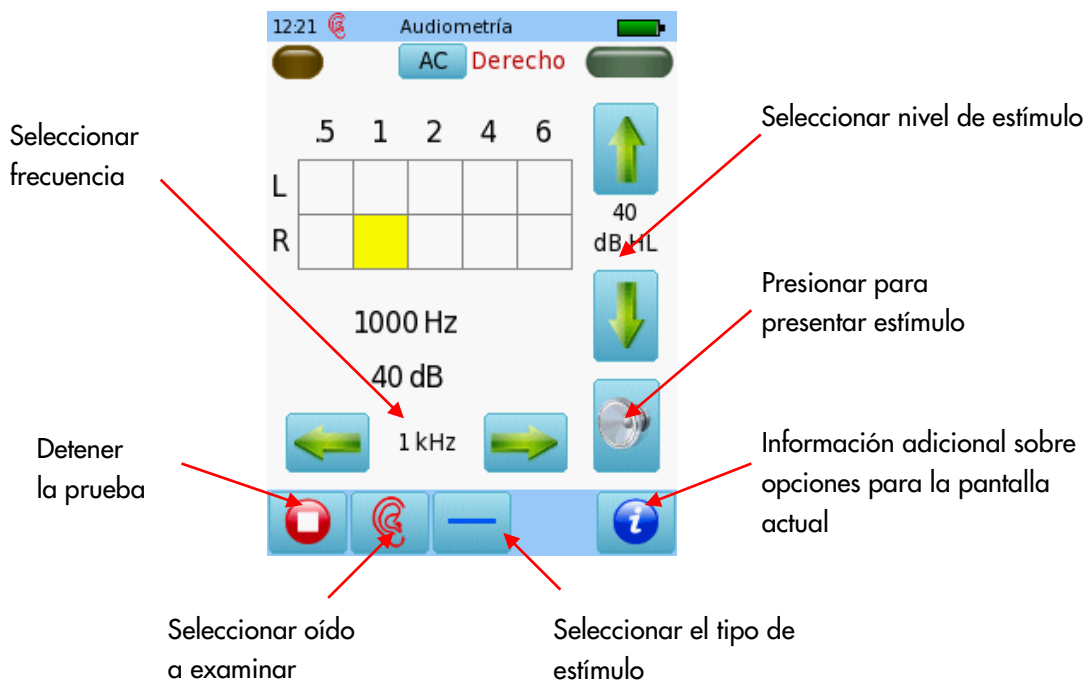

GUÍA RÁPIDA SENTIERO HANDHELD DIAGNÓSTICO AVANZADO (ETIQUETA AZUL)

Al presentar el estímulo, se muestra el nivel actual en el cuadro correspondiente. Una vez que se ha identificado el estado de audición para una frecuencia, pase a la siguiente.

Al presionar dos veces en uno de los cuadros aparecerá NR (no hay respuesta).

Presione tres veces para regresar al cuadro vacío.

Una vez que se han examinado todas las frecuencias para un oído, puede examinar el otro.



Al terminar la prueba, puede guardar los resultados, imprimir una etiqueta (se necesita una impresora de etiquetas) o imprimir a un archivo pdf.

SCREENING CON OTOEMISIONES DE PRODUCTO DE DISTORSIÓN (DPOAE)


Conecte la sonda roja al conector rojo y seleccione uno de los Protocolos disponibles para DPOAE Rápido.. Para realizar pruebas binaurales, conecte también la sonda azul al conector azul.



Seleccione el tamaño adecuado de oliva y colóquela en la punta de la sonda. Inserte la sonda en el oído asegurándose de obtener un buen sello del canal auditivo.

Seleccione el oído a examinar presionando el ícono de oído **Derecho** o **Izquierdo**, o **Derecho + Izquierdo** para pruebas binaurales.

El modo historieta mostrará una historieta al comenzar la prueba en lugar de la barra de progreso.

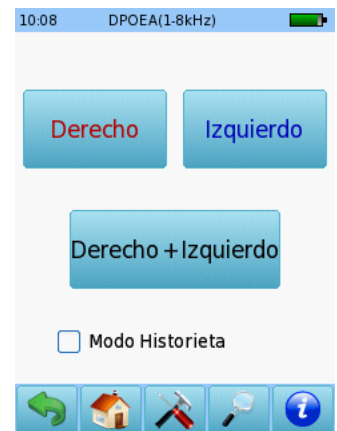


GUÍA RÁPIDA SENTIERO HANDHELD DIAGNÓSTICO AVANZADO (ETIQUETA AZUL)

Se realizará una calibración antes de la medición. Una luz verde indica una calibración correcta. Luego de una calibración correcta de la sonda, la prueba comenzará automáticamente.



RESULTADOS DE PRUEBAS DPOAE SCREENING

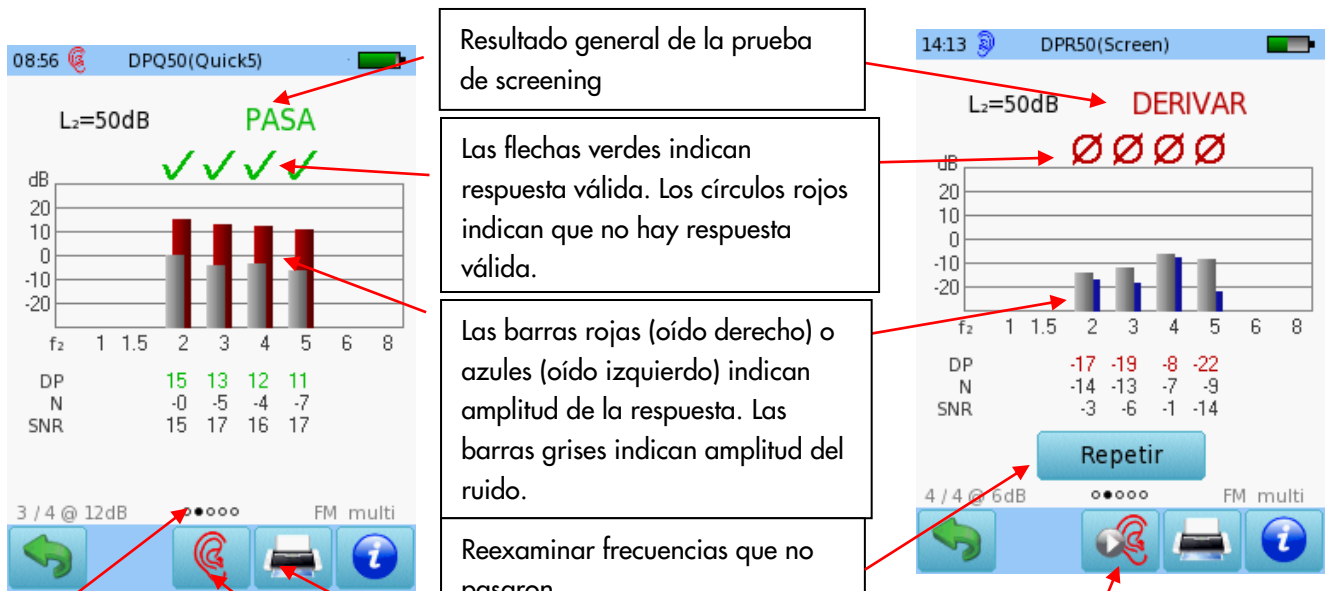

Nota: Estos círculos indican que hay otras pantallas que pueden verse. Deslice el dedo hacia la derecha o izquierda para ver las otras pantallas.

GUÍA RÁPIDA SENTIERO HANDHELD DIAGNÓSTICO AVANZADO (ETIQUETA AZUL)

DPOAE DIAGNÓSTICO / ALTA RESOLUCIÓN


Seleccione uno de los Protocolos disponibles para DPOAE Diagnóstico y conecte la sonda roja al conector rojo. Para realizar pruebas binaurales, conecte también la sonda azul al conector azul.



Seleccione el tamaño adecuado de oliva y colóquela en la punta de la sonda. Inserte la sonda en el oído asegurándose de que la oliva produce un buen sello del canal auditivo.

Seleccione el oído a examinar presionando el ícono de oído **Derecho** o **Izquierdo**, o **Derecho + Izquierdo** para pruebas binaurales.

El modo historieta mostrará una historieta al comenzar la prueba en lugar de la barra de progreso. Esto puede cambiarse durante la prueba presionando sobre el ícono de avión al pie de página.

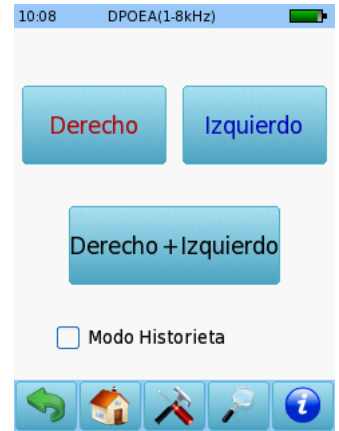

Se realizará una calibración antes de la medición. Una luz verde indica una calibración correcta. Luego de una calibración correcta de la sonda, la prueba comenzará automáticamente.

10:17 DPOEA(1-8kHz) Verificando...

Ajuste la sonda o presione » para continuar.

Omitir ajuste de sonda para pacientes con tubos de timpanostomía o perforaciones del oído medio

Omitir una frecuencia

Pausar/Reanudar la prueba

Detener la prueba

Progreso para cada frecuencia examinada en cada oído

Progreso general de la prueba

Nivel de ruido

Cambiar a modo historieta

Prueba binaural, multifrecuencia


14:03 DPOAE(Diag65/55)

3000 6000 3000 6000
55 65 55 55

13%

GUÍA RÁPIDA SENTIERO HANDHELD DIAGNÓSTICO AVANZADO (ETIQUETA AZUL)

RESULTADOS DE PRUEBAS DPOAE DIAGNÓSTICO / ALTA RESOLUCIÓN

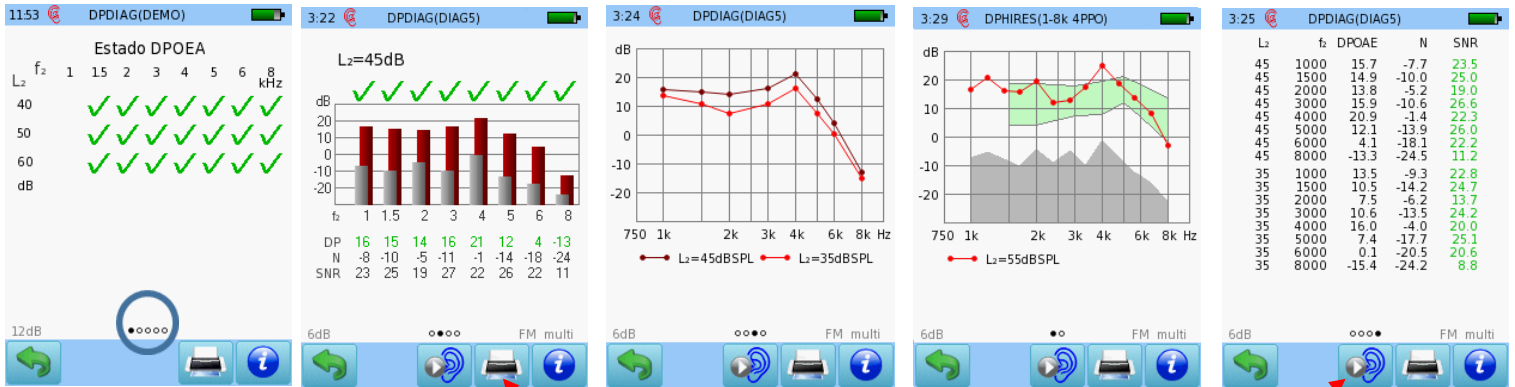

Nota: Estos círculos indican que hay otras pantallas que pueden verse. Deslice el dedo hacia la derecha o izquierda para ver las otras pantallas.

Imprimir los resultados a una etiqueta o un archivo pdf

Examinar el otro oído

Las flechas verdes indican respuesta válida

Las barras rojas o azules indican respuesta, las barras grises indican ruido.

Resultado para cada prueba ordenado por f2 y L2. Se muestran resultados para varios niveles. Presione sobre la pantalla para ver los detalles de cada nivel examinado.

Resultados de prueba de alta resolución (4 PPO)

Valores numéricos en formato tabular

DPOAE BÚSQUEDA DE UMBRALES


Seleccione uno de los Protocolos disponibles para DPOAE Búsqueda de Umbrales y conecte la sonda roja al conector rojo. Para realizar pruebas binaurales, conecte también la sonda azul al conector azul.



Seleccione el tamaño adecuado de oliva y colóquela en la punta de la sonda. Inserte la sonda en el oído asegurándose de que la oliva produce un buen sello del canal auditivo.

Seleccione el oído a examinar presionando el ícono de oído **Derecho** o **Izquierdo**, o **Derecho + Izquierdo** para pruebas binaurales.

El modo historieta mostrará una historieta al comenzar la prueba en lugar de la barra de progreso. Esto puede cambiarse durante la prueba presionando sobre el ícono de avión al pie de página.

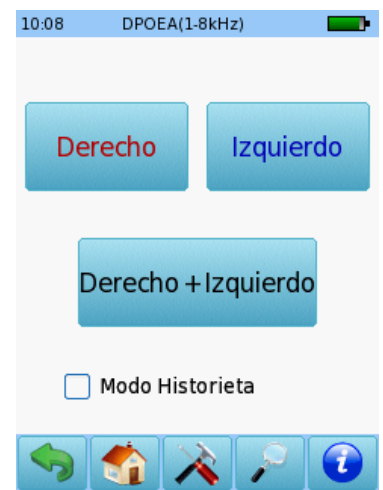

GUÍA RÁPIDA SENTIERO HANDHELD DIAGNÓSTICO AVANZADO (ETIQUETA AZUL)

Se realizará una calibración antes de la medición. Una luz verde indica una calibración correcta. Luego de una calibración correcta de la sonda, la prueba comenzará automáticamente.

Verificando...

Ajuste la sonda o presione >> para continuar.

Omitir ajuste de sonda para pacientes con tubos de timpanostomía o perforaciones del oído medio

Pausar/Reanudar la prueba

Detener la prueba

Progreso para cada frecuencia examinada en cada oído

Nivel de ruido

Omitir una frecuencia

Modo historieta para niños

RESULTADOS DE PRUEBA DPOAE BÚSQUEDA DE UMBRALES

DPTHRES

DPOEA Umbral

El fondo verde indica el rango de audición normal

Imprimir los resultados a una etiqueta o un archivo pdf

GUÍA RÁPIDA SENTIERO HANDHELD DIAGNÓSTICO AVANZADO (ETIQUETA AZUL)

Información de la Guía Rápida

Fecha de publicación: 2019-07
Revisión: 02
Válida a partir de: Rev. de Firmware 2.5, Rev. software Mira para PC 2.0
Aplicable a: Modelo: SOH100098, descripción de Internet SOH03.

Todos los artículos, productos y marcas mencionados están registrados por las empresas indicadas o pertenecen a las mismas.

Toda la información, ilustraciones y especificaciones incluidas en este documento se basan en la información más reciente sobre los productos disponible en el momento de la publicación. PATH MEDICAL se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin notificación.

Por favor tenga en cuenta que no todos los productos que se muestran en nuestro sitio de Internet o en los materiales de publicidad están disponibles en todos los territorios. Por favor contacte a su distribuidor local o a PATH MEDICAL para mayor información.

La revisión más reciente de la Guía Rápida está disponible en Internet en www.pathme.de/download.

Se exceptúan los errores y las omisiones.

Derechos de autor

Ninguna parte de este documento puede reproducirse, traducirse, guardarse, o transmitirse por ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopia, grabación ni ningún otro, sin previamente obtener autorización escrita de PATH MEDICAL GmbH.

Copyright © 2019 PATH medical GmbH

PATH medical GmbH
Landsberger Straße 65
82110 Germering
Germany

Tel.: +49 89 800 76 502 Fax: +49 89 800 76 503 Internet: www.pathme.de

CE
0124