


GUÍA RÁPIDA CÓMO VER E IMPRIMIR RESULTADOS DE PRUEBAS CON EQUIPOS SENTIERO HANDHELD

CÓMO VER RESULTADOS DE PRUEBAS DE PACIENTES



CÓMO IMPRIMIR RESULTADOS DE PRUEBAS DE PACIENTES

Puede seleccionar una prueba guardada como se indica arriba. Para imprimir una prueba una vez que ha terminado y grabado los datos, presione el ícono de impresora  en la parte inferior de la pantalla. Se mostrará la lista de pruebas realizadas para la sesión actual. Puede imprimir los resultados de las pruebas como "Sesión", o ingresar detalles del paciente.

GUÍA RÁPIDA CÓMO VER E IMPRIMIR RESULTADOS DE PRUEBAS CON EQUIPOS SENTIERO HANDHELD

13:46 session 2018/11/19

- DPTHRES 2018/11/19 Mon 18:22
- DPDIAG 2018/11/19 Mon 18:18
- DPR50 2018/11/19 Mon 18:17
- TEDIAG 2018/11/19 Mon 18:16
- TEQUICK 2018/11/19 Mon 18:16
- DPR50 2018/11/19 Mon 18:14

09:15 Detalles del paciente

¿Desea ingresar los detalles del paciente antes de imprimir?

Identificador

Pulsar para editar

Nombre

Apellido(s)

Fecha de nacimiento

09:15 Detalles del paciente*

¿Desea ingresar los detalles del paciente antes de imprimir?

Identificador

Pulsar para editar

Nombre

Apellido(s)

Fecha de Nacimiento

10:13 Detalles del paciente

RENAMED

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

Z X C V B N M , .

@ ? ← →

123 ?/Ba

Presione este botón para eliminar todas las marcas.

Presione OK al finalizar la selección de pruebas

Puede ingresar detalles del paciente antes de imprimir

Presione OK para imprimir como Sesión, o ...

Ingrese detalles del paciente utilizando el teclado

Presione OK para imprimir con el nombre del paciente

10:38 RODRIGO SILVA

DPHIRES 17.04.2019 17:44

Error de la impresora

No hay impresora de etiquetas conectada

OK

Si el equipo no está conectado a una impresora de etiquetas o a una computadora con MIRA Direct Print aparecerá un mensaje de error (ver detalles abajo)

GUÍA RÁPIDA CÓMO VER E IMPRIMIR RESULTADOS DE PRUEBAS CON EQUIPOS SENTIERO HANDHELD

IMPRIMIR UTILIZANDO IMPRESORA DE ETIQUETAS




Conecte el cable de la impresora de etiquetas a la impresora y al conector correspondiente en el equipo. Asegúrese de que tanto la impresora como el equipo estén conectados a la red eléctrica.



Su(s) etiqueta(s) se imprimirá(n) (una o varias, dependiendo de cuántas pruebas haya seleccionado).

IMPRIMIR UTILIZANDO MIRA DIRECT PRINT


Instale el software MIRA, que incluye la aplicación Direct Print, en su PC. Esto instalará este ícono en su escritorio:  Haga doble click para abrir Direct Print. El ícono aparecerá en su barra de herramientas para indicar que está activo en Segundo plano y disponible para imprimir. Si abre el software MIRA, Direct Print queda en pausa. Al cerrar MIRA, Direct Print Vuelve a activarse.

Conecte el cable USB a la PC y al puerto USB del equipo Sentiero.



Aparecerá una visualización previa de la impresión en la PC. Seleccione Archivo – Exportar Documento – Archivo PDF.

Se abre la Ventana “Opciones de Exportación a PDF”. Haga click en Aceptar. Se abrirá la Ventana “Guardar como”. Cambie el nombre del documento si lo desea. Seleccione dónde desea guardar el archivo, y presione Guardar.

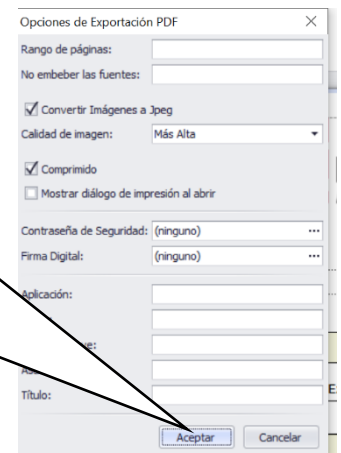

GUÍA RÁPIDA

CÓMO VER E IMPRIMIR RESULTADOS DE PRUEBAS CON EQUIPOS SENTIERO HANDHELD

Información de la Guía Rápida

Fecha de publicación: 2019-07
Revisión: 02
Válida a partir de: Rev. de Firmware 2.5, Rev. software Mira para PC 2.0

Aplicable a: Modelo: SOD100497, todas las descripciones de Internet.

Todos los artículos, productos y marcas mencionados están registrados por las empresas indicadas o pertenecen a las mismas.

Toda la información, ilustraciones y especificaciones incluidas en este documento se basan en la información más reciente sobre los productos disponible en el momento de la publicación. PATH MEDICAL se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin notificación.

Por favor tenga en cuenta que no todos los productos que se muestran en nuestro sitio de Internet o en los materiales de publicidad están disponibles en todos los territorios. Por favor contacte a su distribuidor local o a PATH MEDICAL para mayor información.

La revisión más reciente de la Guía Rápida está disponible en Internet en www.pathme.de/download. Se exceptúan los errores y las omisiones.

Derechos de autor

Ninguna parte de este documento puede reproducirse, traducirse, guardarse, o transmitirse por ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopia, grabación ni ningún otro, sin previamente obtener autorización escrita de PATH MEDICAL GmbH.

Copyright © 2019 PATH medical GmbH

PATH medical GmbH
Landsberger Straße 65
82110 Germering
Germany

Tel.: +49 89 800 76 502 Fax: +49 89 800 76 503 Internet: www.pathme.de

CE
0124