

# GUÍA RÁPIDA SENTIERO ADVANCED SCREENING ABR (ETIQUETA DORADA)

## ENCENDIDO, APAGADO, CARGA DEL EQUIPO



Botón de encendido/a pagado al lado derecho



Conector para el cargador

## MENÚ DE INICIO

*Nota: esta pantalla (opciones de prueba) puede variar dependiendo de la configuración de su equipo*



# GUÍA RÁPIDA SENTIERO ADVANCED SCREENING ABR (ETIQUETA DORADA)

## PRUEBAS

### SCREENING CON POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE TRONCO (ABR)

Por favor tenga en cuenta que se muestra la prueba de ABR screening para un oído a la vez. Para instrucciones sobre pruebas binaurales, por favor consulte la Guía Rápida de ABR diagnóstico.


Conecte el cable de electrodos



al conector blanco y la sonda al conector rojo.



Limpie la piel del paciente y coloque los parches de electrodos. Conecte los clips en los sitios correspondientes. El montaje recomendado es:

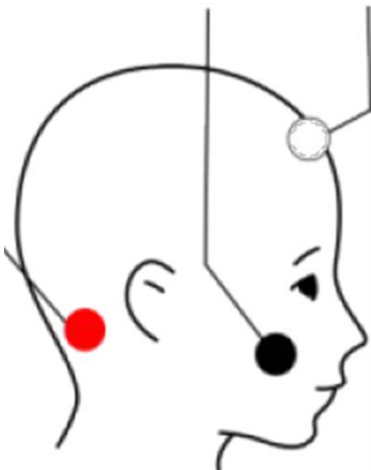

Blanco: parte alta de la frente

Negro: mejilla


Rojo: mastoide

# GUÍA RÁPIDA SENTIERO ADVANCED SCREENING ABR (ETIQUETA DORADA)

Seleccione el tamaño adecuado de oliva y colóquela en la punta de la sonda. Inserte la sonda en el oído asegurándose de obtener un buen sello del canal auditivo.

Seleccione ABR Rápido.

Seleccione el oído a examinar presionando el ícono de oído Derecho o Izquierdo

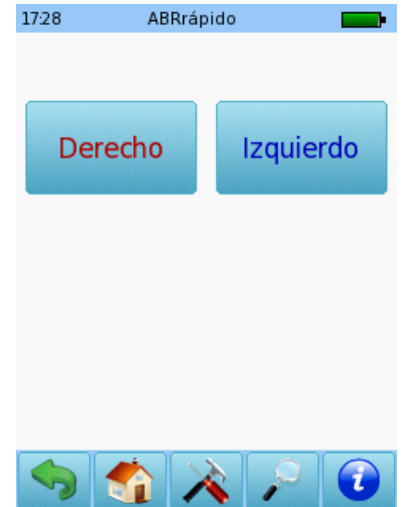


Se realizará una calibración antes de la medición. Una luz verde indica una calibración correcta.

Se realizará también una verificación de la impedancia antes de la medición. Se recomienda una impedancia inferior a 6 kOhm para mejores resultados.

Luego de una calibración correcta de la sonda, la prueba comenzará automáticamente

Si se muestran luces amarillas o rojas, verifique que está utilizando la punta de sonda y el tamaño de oliva correctos, que la oliva está correctamente colocada, y que no haya ruido ambiental excesivo.

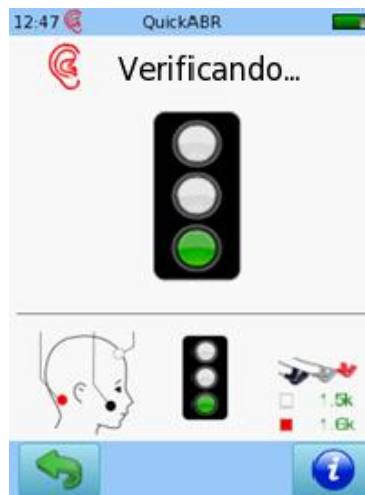

# GUÍA RÁPIDA SENTIERO ADVANCED SCREENING ABR (ETIQUETA DORADA)

## PANTALLA DE PRUEBA DE ABR SREENING

Datos normativos para la edad seleccionada: rojo – onda III, verde – onda V

Barra de detección de respuesta

EEG en curso – el valor debe estar en el tercio inferior

Progreso de la prueba

Detener la prueba

Pausar/Reanudar la prueba

Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para cambiar la escala de visualización

Monitor de impedancia – la impedancia debe mantenerse por debajo de 6 kOhm para obtener mejores resultados

## RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ABR SREENING

Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para cambiar la escala de visualización

Resultado general de la prueba de screening

Parámetros y condiciones de la prueba

Imprimir los resultados a una etiqueta o a un archivo pdf

Examinar el otro oído

Estímulo	Chirp 35dB eHL
Promedios	258
EEG	47nV
Impdnc	4.2k / 2.9k

# GUÍA RÁPIDA SENTIERO ADVANCED SCREENING ABR (ETIQUETA DORADA)

---

## Información de la Guía Rápida

Fecha de publicación: 2019-07  
Revisión: 01  
Válida a partir de: Rev. de Firmware 2.5, Rev. software Mira para PC 2.0  
Aplicable a: Modelo: SOH100360, descripciones de Internet SOH06, SOH07, SOH08 y SOH09

Todos los artículos, productos y marcas mencionados están registrados por las empresas indicadas o pertenecen a las mismas.

Toda la información, ilustraciones y especificaciones incluidas en este documento se basan en la información más reciente sobre los productos disponible en el momento de la publicación. PATH MEDICAL se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin notificación.

Por favor tenga en cuenta que no todos los productos que se muestran en nuestro sitio de Internet o en los materiales de publicidad están disponibles en todos los territorios. Por favor contacte a su distribuidor local o a PATH MEDICAL para mayor información.

La revisión más reciente de la Guía Rápida está disponible en Internet en [www.pathme.de/download](http://www.pathme.de/download).  
Se exceptúan los errores y las omisiones.

## Derechos de autor

Ninguna parte de este documento puede reproducirse, traducirse, guardarse, o transmitirse por ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopia, grabación ni ningún otro, sin previamente obtener autorización escrita de PATH MEDICAL GmbH.

Copyright © 2019 PATH MEDICAL GmbH

PATH MEDICAL GmbH  
Landsberger Straße 65  
82110 Germering  
Germany

Tel.: +49 89 800 76 502 Fax: +49 89 800 76 503 Internet: [www.pathme.de](http://www.pathme.de)

CE  
0124